


Safety-Kanüle

Handhabungshinweis

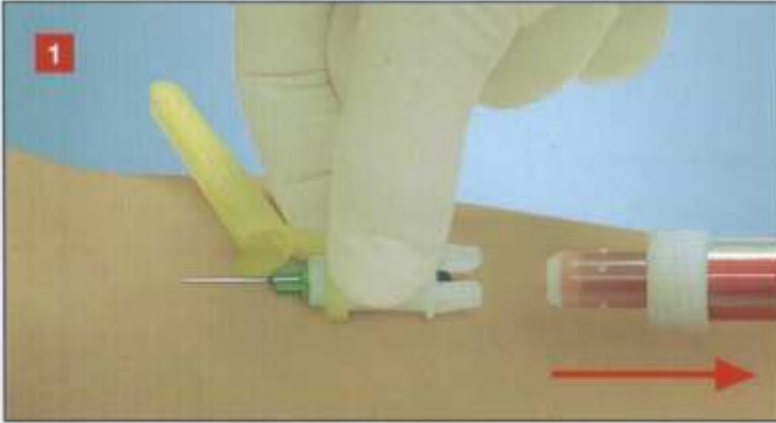

Nach der Blutentnahme:

Die letzte S-Monovette® aus der Safety-Kanüle lösen.



Die Safety-Kanüle am Adapter fassen und (z.B. auf einer flachen Oberfläche) die Nadel nach unten in den Kanülenschutz fühl- und hörbar einrasten.



Nach Aktivierung des Kanülenschutzes:

Entsorgen Sie die Kanüle entsprechend den für Ihren Bereich gültigen Vorschriften und Richtlinien.



SARSTEDT

info@sarstedt.com · www.sarstedt.com

SARSTEDT AG & Co. · Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht · Telefon (+49) 0 22 93 30 50 · Telefax (+49) 0 22 93 305-282 · Service 0800 0 83 30 50